

# Informations- broschüre

die Kontaktlinsenträger von ihrem Kontaktlinsenspezialisten oder Optometristen ausgehändigt wird

hersteller: bilosa händel GmbH

hauptfrachtenbahnhof 2c, 6020 innsbruck, Austria  
t: +43-512 57 63 86, f: +43-512 57 63 86-21, office@bilosa.com

## Weiche Kontaktlinse zur Verwendung auf dem Auge

Produktname: siehe Label auf Verpackung

Materialbezeichnung: siehe Label auf Verpackung

Lagerungs Lösung: Kochsalzlösung

Anwendung: Werden im Auge getragen

Tragezeiten:

die Kontaktlinsen sind für den täglichen Gebrauch geeignet, müssen aber über Nacht herausgenommen werden. halten sie sich an die Tragezeiten, die ihnen ihr Kontaktlinsenspezialist oder Optometrist genannt hat.

Indikation:

Korrektur von Brechungsfehlern und Optimierung des Sehvermögens.

Sterilität:

die Kontaktlinsen sind dampfsterilisiert. die Sterilität ist nur gewährleistet, wenn die versiegelte Verpackung geschlossen und unbeschädigt ist. benutzen sie die Linsen nicht, wenn die Packung in irgendeiner Weise manipuliert wurde.

Ausgangspunkt:

nach Anweisung des Kontaktlinsenspezialisten. Kontaktlinsen mit dem Vermerk auf der Packung "For daily replacement" sind zur einmaligen Verwendung an einem einzigen Tag vorgesehen.

## Wechseln Sie Ihre Kontaktlinsen mit Anderen Substanzen:

- um eine unerwünschte Wechselwirkung zwischen den Kontaktlinsen und der Reinigungslösung zu vermeiden, benutzen sie nur die von ihrem Kontaktlinsenspezialisten oder Optometristen empfohlenen Mittel. diese Lösungen sind mit ihren Linsen kompatibel.
- Langfristig eingenommene Arzneimittel können die Verträglichkeit der Kontaktlinsen beeinflussen. informieren sie ihren Kontaktlinsenspezialisten oder Optometristen über alle Arzneimittel, die sie einnehmen.

Tragen sie die Kontaktlinsen nicht, wenn eine der folgenden Bedingungen zutrifft:

- Entzündung, Infektion, Rötung oder Reizung des Auges oder Augenlids.
- Veränderte Empfindlichkeit der Hornhaut oder verringerte Produktion der Tränenflüssigkeit.
- Jede Allgemeinerkrankung, die auch die Augen beeinflusst oder bei der das Tragen von Kontaktlinsen das Komplikationsrisiko erhöht.
- Unverträglichkeit oder anomale Reaktion des Auges auf das Tragen der Kontaktlinsen.
- Kontaktlinsen sind defekt.
- Kontaktlinsenträger kann oder will die Anweisungen zur sicheren Verwendung von Kontaktlinsen nicht befolgen.

Informieren Sie Ihren Kontaktlinsenspezialisten, Optometristen oder Augenarzt, wenn eine dieser Bedingungen eintritt.

## gegen Anzeigen:


berichten sie ihrem Kontaktlinsenspezialisten oder Optometristen über alle Veränderungen am Auge, die während des Tragens der Kontaktlinsen auftreten. solche Veränderungen sind beispielsweise vermehrter Tränenfluss, starke Rötung, schlechtes Sehvermögen oder allergische Reaktionen. Wenn sie solche Veränderungen nicht untersuchen lassen, können sie zu dauerhaften Schäden am Auge führen.

normale Linse/  
innenseite außen  
(Fig. 1)



Linsen einsetzen (Fig. 2)

Linsen herausnehmen (Fig. 3)

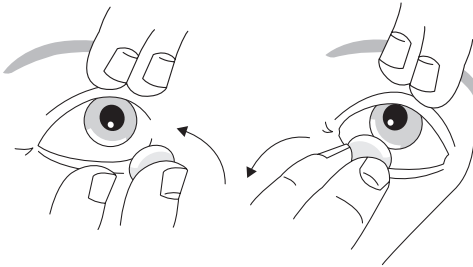

## besondere Vorsichtsmassnahmen:

- Lassen sie ihre Kontaktlinsen regelmäßig von ihrem Kontaktlinsenspezialisten oder Optometristen überprüfen.
- Waschen sie ihre Hände gründlich mit seife und trocknen sie sie vollständig ab, bevor sie die Kontaktlinsen anfassen.
- Kontaktlinsen mit dem Vermerk auf der Packung "For daily replacement" bitte nach dem Herausnehmen entsorgen, da sie nicht erneut verwendet werden sollten.
- die Kontaktlinsen und der Lagerbehälter für die Kontaktlinsen müssen regelmäßig und sorgfältig gespült und gepflegt und schließlich ausgetauscht werden, wie es ihnen ihr Kontaktlinsenspezialist

oder Optometrist gezeigt hat. benutzen sie kein Leitungswasser, um die Linsen zu spülen. nehmen sie statt dessen eine sterile Kochsalzlösung. Lassen sie den Lagerbehälter in geöffnetem Zustand austrocknen.

- befolgen sie die Anweisungen genau, die der Reinigungslösung und den Augentropfen beiliegen.
- benutzen sie keine andere Reinigungslösung für die Kontaktlinsen, ohne vorher mit ihrem Kontaktlinsenspezialisten oder Optometristen gesprochen zu haben.
- tragen sie die Kontaktlinsen nicht länger, als von ihrem Kontaktlinsenspezialisten oder Optometristen empfohlen.
- bei schlechten Lichtverhältnissen können bi- oder multifokallinsen Reflexionen erzeugen, die das Sehvermögen beeinträchtigen. Überzeugen sie sich, dass ihr Sehvermögen bei Dämmerung oder Nacht nicht eingeschränkt ist, insbesondere bevor sie ein Kraftfahrzeug fahren.
- tragen sie beim Schwimmen keine weichen Kontaktlinsen. dies kann zu bakterien- oder Vireninfektionen führen.
- benutzen sie keine Linsen weiter, die längere Zeit unbenutzt gelagert wurden. entsorgen sie in diesem Fall die alten Linsen und benutzen sie neue.
- Wenn sie die Kontaktlinsen zum ersten Mal benutzen, überzeugen sie sich davon, dass die Versiegelung der Verpackung unbeschädigt und die Verpackung nicht offen ist. Wenn dies nicht der Fall ist, wenden sie sich an den Hersteller.
- Wenn ihre Augen nach Kontakt mit Rauch oder Flüssigkeiten gereizt sind, nehmen sie die Linsen heraus und spülen sie sie gründlich mit Kochsalzlösung.
- eine Schwangerschaft oder die Einnahme eines oralen Verhütungsmittels kann den Tragekomfort der Kontaktlinsen verringern. sprechen sie ihren Kontaktlinsenspezialisten oder Optometristen an, wenn dies der Fall ist.

## Halbjarkeitsdatum:

Das Haltbarkeitsdatum ist auf der Packung aufgedruckt. Nicht benutzen, wenn das Haltbarkeitsdatum überschritten ist.